



Art. TS004Z00

KIT TEST

FORNITURA ANNUA TEST
DI STERILIZZAZIONE

composto da:
1 conf. Vaporline 250 pz.
1 conf. Spore da 20 fiale
1 conf. Helix test 50 strisce
1 conf. Bowie&Dick da 12 pz.



Art. 280-S

STERILDOCS

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE

Studiato per garantirvi una corretta
archiviazione dei test eseguiti.

VALIDOLine

PROCEDURE DI CONTROLLO PERIODICO PER AUTOCLAVI A VAPORE

Controllare periodicamente l'efficienza delle proprie
autoclavi è una attività che ogni struttura deve
eseguire, seguendo precise procedure operative.

UTILIZZATE LA LINEA TEST VALIDOLine TECNO-GAZ

CONTATTATE I NOSTRI RESPONSABILI DI AREA



TEST OBBLIGATORI DI CONTROLLO

PER AUTOCLAVI DI TIPO B

L'utilizzatore di un dispositivo medico ha il dovere di controllare periodicamente l'efficienza del dispositivo stesso, seguendo procedure fissate da direttive, normative o linee guida.



	B Test Plus Spore (conf. da 20 fiale)	VaporLine 250 pz.	SteamPlus 100 pz.	Bowie & Dick 20 pezzi	Helix Test (conf. 50 Strip ricambio)	VACUUM TEST
TEST BIOLOGICO	INTEGRATORI CHIMICI	BOWIE & DICK	HELIX TEST	VACUUM TEST		
FINALITÀ	Serve a valutare la capacità dell'autoclave di distruggere tutti i microrganismi incluse le spore.	Gli integratori chimici, sono dispositivi più idonei per il controllo della sterilizzazione a vapore, in quanto interagiscono con tutti i parametri del ciclo, (pressione, temperatura, tempo) certificandone la corretta stabilità.	Test fisico, serve a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi tipo B.	Test fisico, serve a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi cavi.	Vacuum test è una prova di tenuta della camera o prova della perdita del vuoto.	
DISPOSITIVI	Incubatore biologico • Fiale spore Attenzione importantissimo! Le spore devono essere incubate entro 1 ora dal processo di sterilizzazione	VaporLine e SteamPlus: Servono a valutare la capacità di sterilizzazione dell'autoclave attraverso i parametri della macchina.	Pacchetto Bowie & Dick monouso Attenzione importantissimo! Il test va eseguito periodicamente anche se la struttura non sterilizza i corpi porosi.	Sistema HELIX TEST con strip Attenzione importantissimo! Il test va eseguito periodicamente anche se la struttura non sterilizza i corpi cavi.	Integrato nell'autoclave	
PERIODICITÀ	Consigliata ogni 30 giorni	• 1 volta al gg per studi mono-professionali • In tutte le buste per gli studi pluri-professionali	Consigliata ogni 30 gg	Consigliata ogni 30 gg	Consigliata ogni 7 gg	
CONFORME ALLE NORME	EN ISO 11138 -1	EN ISO11140-1 Classe 5	11140-4	EN ISO 11138 -1		
RESPONSO TEST						
CODICE PRODOTTO	B Test Plus Art. 2035TS	Spore Art. TS002ZBK	VaporLine Art. 200/S	SteamPlus Art. 216S	Bowie & Dick Art. TS00BED	Helix Test Art. TS001ZHT