



PRODOTTI PER

STRIPPING IN ORTODONZIA



VALIDITÀ
1 GENNAIO 2023

STRUMENTI
ABRASIVI
MANUALI E PER
IL CONTRANGOLO
RECIPROCANTE

Leone[®]

Intensiv
Swiss Dental Products








PROCEDURA DI STRIPPING

La riduzione uni/bilaterale dello smalto interprossimale è una procedura che vanta un pluriennale utilizzo clinico. È molto utile per guadagnare spazio, limitando la necessità di estrazioni, nei trattamenti ortodontici sia vestibolari che linguali, mentre è spesso inclusa nella terapia con allineatori.

La linea di prodotti Intensiv dedicata ai **Protocolli IPR (InterProximal Reduction)** permette di effettuare trattamenti precisi dimensionalmente, veloci e sicuri.

La procedura è incrementale, rapida e confortevole per il paziente.

Il protocollo di Stripping in Ortodonzia è stato sviluppato per effettuare, sulla base di una selezione di prodotti, l'apertura dei punti di contatto, la riduzione delle superfici prossimali, il controllo e la verifica dello spazio ottenuto tra i denti ed infine la rifinitura e lucidatura delle superfici.

INIZIO	PROTOCOLLO IPR	TEMPO DI UTILIZZO *	CONTROLLO	FINE
OPENER 	MEDIUM 	0,1mm → 5" circa		CONTOURING 
		0,2mm → 10" circa		
	COARSE 	0,3mm → 3" circa		
		0,4mm → 5" circa		
EXTRACOARSE 	0,5mm → 7" circa	POLISHING 		
APERTURA PUNTI CONTATTO	RIDUZIONE SMALTO E CREAZIONE SPAZIO TRA DENTI		VERIFICA SPAZIO CREATO	FINITURA E LUCIDATURA

*Il tempo di utilizzo degli Ortho-Strips è indicativo e dipende dalla pressione esercitata dall'operatore, dalla quantità di irrigazione utilizzata e dall'usura dell'Ortho-Strips.

IPR-**DistanceControl**

Strumento manuale per la verifica ed il controllo dello spazio creato tra i denti durante la procedura di Stripping.
Disponibile singolarmente o come Set da 8 pezzi.

Rif. LIPRDC010	spessore 0,10 mm
Rif. LIPRDC015	spessore 0,15 mm
Rif. LIPRDC020	spessore 0,20 mm
Rif. LIPRDC025	spessore 0,25 mm
Rif. LIPRDC030	spessore 0,30 mm
Rif. LIPRDC040	spessore 0,40 mm
Rif. LIPRDC050	spessore 0,50 mm
Rif. LIPRDC100	spessore 1,0 mm
Rif. LIPR-DC-SET	Set con 8 spessori assortiti



VANTAGGI

- In acciaio inossidabile, garantiscono lunga durata
- Manipolazione sicura grazie all'ottima presa
- Disponibili in varie misure
- Per verificare lo spazio interdentale sommare tra loro i singoli IPR-DistanceControl
- È possibile raggruppare gli elementi con un rivetto





Intensiv Ortho-Strips, Central *new*

Innovativi Strips oscillanti diamantati nella zona operativa centrale che consentono un trattamento sicuro evitando la creazione di gradini e l'abrasione della dentina.

L'arco leggermente pieghevole permette l'adattamento dello Strip all'anatomia dentale orizzontale e l'adeguamento alle superfici dentali opposte. Ideale per la riduzione, rifinitura e lucidatura dello smalto approssimale in Ortodonzia.

Durante il processo di riduzione, rifinitura e lucidatura dello smalto in Ortodonzia (Stripping) può capitare che si crei un **gradino cervicale** o che si elimini involontariamente dentina nell'area sotto equatoriale del dente, provocando nel paziente una probabile successiva sensibilità dentale.

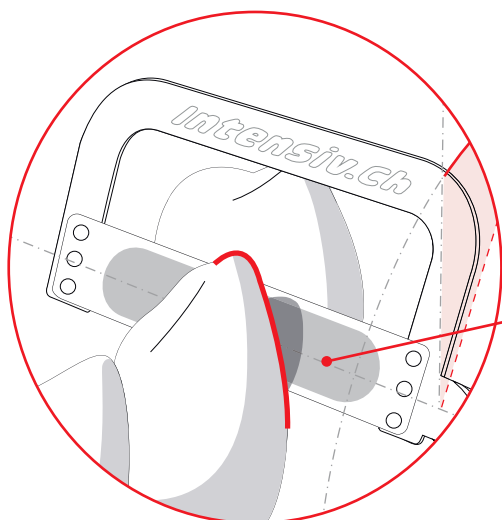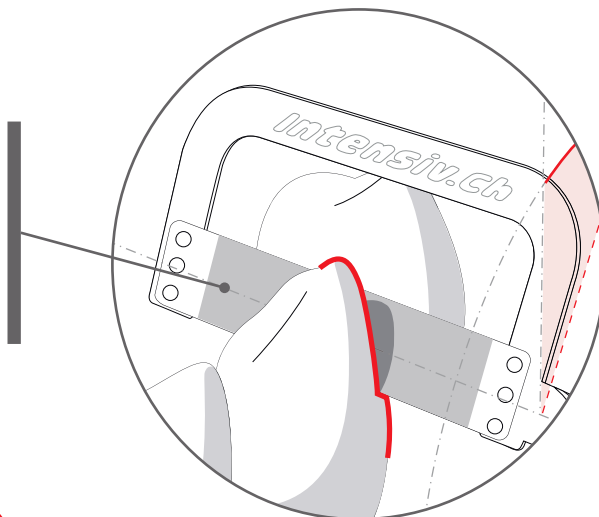

Grazie al rivestimento di diamante nella zona operativa centrale, Intensiv Ortho-Strips System Central consente una elevata precisione nella riduzione, rifinitura e lucidatura approssimale dello smalto **rispettando la morfologia originaria e i tessuti dentali.**

VANTAGGI:

- Introduzione facilitata tra i punti di contatto interdentali
- Prevenzione della formazione dei gradini cervicali
- L'ipersensibilità dentinale non è favorita
- Mantenimento della morfologia originaria equatoriale del dente
- Sterilizzabili



*new*Intensiv **Ortho-Strips, Central**

Disponibili in 4 granulometrie differenti, nella versione Double-Sided diamantati su due lati, e One-Sided diamantati da un solo lato, nelle varianti "L", **left** (lato sinistro) e "R", **right** (lato destro) per i lati mesiali e distali nel mascellare superiore ed inferiore.

- Spessore dello Strip non diamantato: 0,05 mm
- Altezza totale dello Strip: 3,7 mm
- Altezza della zona diamantata: 2,7 mm
- Lunghezza della zona diamantata: 13 mm

Rif. **LOST400Set02/6**Tray **Ortho-Strips, Central**

Tray in acciaio inox con 6 inserti e siliconi colorati.

CONTENUTO:

- 2 Ortho-Strips, Double-Sided
 - Rif. **LOS08OP**, Ortho-Strips, Opener
 - Rif. **LOS80C**, Ortho-Strips, Extracoarse
- 4 Ortho-Strips, Central Double-Sided
 - Rif. **LOS60C-CEN-DS**, Ortho-Strips, Central Coarse
 - Rif. **LOS40M-CEN-DS**, Ortho-Strips, Central Medium
 - Rif. **LOS25F-CEN-DS**, Ortho-Strips, Central Contouring
 - Rif. **LOS15POL-CEN-DS**, Ortho-Strips, Central Polishing

Rif. **L6000/WG-69A** senza luce
 Rif. **L6000/WG-69LT** con luce

Intensiv IPR Set



CONTENUTO:

- Rif. **LWG-69** Intensiv Swingle
- 6 Ortho-Strips oscillanti, Double-Sided:
 - Rif. **LOS08OP**, Ortho-Strips, Opener
 - Rif. **LOS60**, Ortho-Strips, Coarse
 - Rif. **LOS80C**, Ortho-Strips, Extracoarse
 - Rif. **LOS25**, 2x Ortho-Strips, Contouring
 - Rif. **LOS15**, Ortho-Strips, Polishing
- 5 IPR-DistanceControl:
 - Rif. **LIPRDC010** (spessore 0,10 mm)
 - Rif. **LIPRDC015** (spessore 0,15 mm)
 - Rif. **LIPRDC020** (spessore 0,20 mm)
 - Rif. **LIPRDC030** (spessore 0,30 mm)
 - Rif. **LIPRDC050** (spessore 0,50 mm)
- 4 Ortho-Strips Manuali
 - Rif. **LOSM8040**, 2x grana Grossa/Media
 - Rif. **LOSM1508**, 2x grana Extra/Ultrafine
- 2 ApproxOpener
 - Rif. **LAO2018OS**, One-Sided
 - Rif. **LAO2018DS**, Double-Sided
- Rif. **L053** Espulsore Intensiv Swingle

Il tray mette a disposizione tutti gli strumenti per lo Stripping disposti in modo ergonomico e pratico per il trattamento di ogni paziente.

Composto da base e coperchio collegati da una cerniera, è realizzato in acciaio inox lucido e presenta dimensioni idonee alla sterilizzazione in autoclave.

Gli Ortho-Strips e i misuratori di spazio sono inseriti in due supporti interni pieghevoli che riportano i numeri di articolo degli strumenti e il colore di riferimento. Questi supporti devono essere orientati parallelamente al piano di lavoro durante l'uso degli strumenti e ripiegati all'interno dopo aver igienizzato il contenuto del tray, che sarà pronto per la sterilizzazione.

Rif. **L071**



Refill per IPR Set

CONTENUTO: 6 Ortho-Strips Double-Sided

- Rif. **LOS08OP**, Ortho-Strips, Opener
- Rif. **LOS60**, Ortho-Strips, Coarse
- Rif. **LOS80C**, Ortho-Strips, Extracoarse
- Rif. **LOS25**, 2x Ortho-Strips, Contouring
- Rif. **LOS15**, Ortho-Strips, Polishing

Rif. **LWG-69 A** senza luceRif. **LWG-69 LT** con luceIntensiv **Swingle****CARATTERISTICHE:**

- 2 funzioni in un solo contrangolo con micro-meccanismo duale attivato da un pulsante sul retro della testina, per scegliere tra posizione assiale fissa o rotazione assiale libera di Intensiv Ortho-Strips System
- Contrangolo dotato di sistema spray e luce integrati
- Movimento reciprocante da 0,9 mm; 20.000 oscillazioni con 40.000 rpm
- 12 posizioni fisse (ogni 30° su 360°)
- Movimento libero per il posizionamento di Ortho-Strips nella posizione desiderata
- 2 anni di garanzia
- Sterilizzabile

CONTENUTO DEL KIT:

- Rif. **LWG-69**, Swingle
- Rif. **L053**, Espulsore Swingle
- Rif. **L054**, Pulitore Swingle
- Rif. **LOS40**, Ortho-Strips, Medium


Rif. **L053****Espulsore** Intensiv Swingle

Strumento utile per rimuovere gli Ortho-Strips dal contrangolo.

Intensiv Ortho-Strips


Strips oscillanti diamantati da entrambi i lati per la riduzione, rifinitura e lucidatura approssimale dello smalto in Ortodonzia (IPR). Da utilizzare in progressione in base all'esigenza di spazio diagnosticato necessario nel trattamento con allineatori, brackets o dispositivi rimovibili. Disponibili singolarmente o come set.

Pulire e sterilizzare accuratamente gli Ortho-Strips dopo ogni utilizzo per garantirne una durata maggiore.

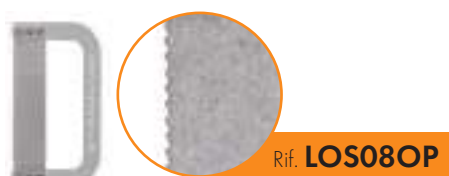


Opener

Apertura punti di contatto
(granulometria 8µm)

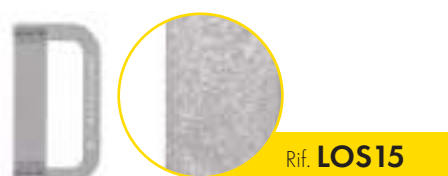

Polishing

Lucidatura superfici trattate
(granulometria 15µm)

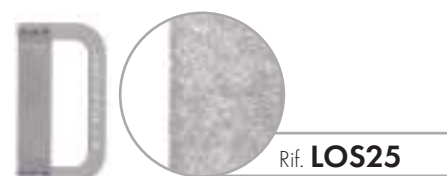

Contouring

Finitura superfici trattate
(granulometria 25µm)




Medium

Modellazione smalto approssimale
(granulometria 40µm)



Coarse

Riduzione smalto approssimale
(granulometria 60µm)

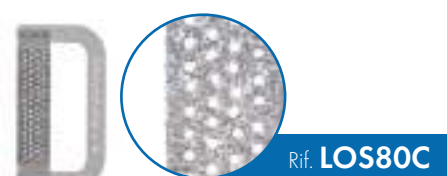

Extracoarse

Creazione spazio
(granulometria 80µm)

Rif. **LO65DS** Double-Sided
Rif. **LO65L** One-Sided, Left
Rif. **LO65R** One-Sided, Right



Intensiv Kit Ortho-Strips

CONTENUTO:

- Ref. **LOS08OP**, Ortho-Strips, Opener
- Ref. **LOS40**, Ortho-Strips, Medium
- Ref. **LOS60**, Ortho-Strips, Coarse
- Ref. **LOS80C**, Ortho-Strips, Extracoarse
- Ref. **LOS25**, Ortho-Strips, Contouring
- Ref. **LOS15**, Ortho-Strips, Polishing

Rif. **LOST400** vuoto



Intensiv Tray Ortho-Strips

Tray compatto in acciaio inox con 6 inserti in silicone colorato per lo stoccaggio e la protezione degli Ortho-Strips oscillanti.

Rif. **LO56ASS/6**



Ricambi inserti in silicone

6 pezzi in colori assortiti.

Intensiv **ApproxOpener**

Disegnati per consentire l'apertura manuale dei punti di contatto particolarmente stretti: la speciale conformazione del margine e lo spessore di soli 8µm favoriscono la precisione dell'inserimento della lama.

Diamantati da entrambi i lati o da un solo lato, la scelta fra i due tipi di strumento avviene in base alla necessità di trattamento monolaterale del dente da ridurre o per il trattamento di entrambe le superfici interprossimali adiacenti.



Rif. **LAO2018OS**

- **Ultrafine**
(granulometria 8µm)
- diamantato
da un solo lato



Rif. **LAO2018DS**

- **Ultrafine**
(granulometria 8µm)
- diamantato
da entrambi i lati



Ortho-Strips **Manuali**

Strips perforati sulla superficie di lavoro con due granulometrie diverse, ideali per la riduzione e rifinitura dello smalto interprossimale.

Diamantati da un solo lato.

Sterilizzabili, multiuso.



Rif. **LOSM1508**

Per la rifinitura e lucidatura delle superfici trattate.
Diamantato da un solo lato.

Disponibile con due tipi di granulometrie:

- **Polishing** (giallo, granulometria 15µm)
- **Opener** (arancione, granulometria 8µm)



VANTAGGI


- Efficiente lucidatura dello smalto interprossimale
- Prese sagomate per una migliore tenuta manuale durante il trattamento

Rif. **LOSM8040**

Per la creazione manuale dello spazio.
Diamantato da un solo lato.

Disponibile con due tipi di granulometrie:

- **Extracoarse** (blu, granulometria 80µm)
- **Medium** (rosso, granulometria 40µm)

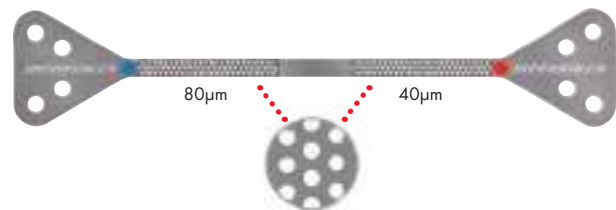



VANTAGGI





- Trattamento senza frizioni grazie alle perforazioni della parte lavorante
- Efficiente riduzione dello smalto interprossimale
- Prese triangolari per una migliore tenuta manuale durante il trattamento

REF.	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA DEL DIAMANTE	Q.TÀ x CONF.	PREZZO IN EURO*
------	-------------	----------------------------	--------------	-----------------

STRUMENTI MECCANICI

	LIPR 6000/WG-69LT	IPR Set, Tray con contrangolo con luce	19 pz	1.825,00
	LIPR 6000/WG-69A	IPR Set, Tray con contrangolo senza luce	19 pz	1.455,00
	LIPR 6000	IPR Tray, vuoto	1 pz	285,00
	LWG-69 LT	Intensiv Swingle, con luce	1 pz	1.170,00
	LWG-69 A	Intensiv Swingle, senza luce	1 pz	790,00
	L053	Espulsore Intensiv Swingle	1 pz	30,40
	L054	Pulitore Intensiv Swingle	1 pz	14,25



ORTHO-STRIPS

	LOS08OP/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Opener	8µm	3 pz	84,60
	LOS08OP-L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Opener	8µm	3 pz	84,60
	LOS08OP-R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Opener	8µm	3 pz	84,60
	LOS15/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS15L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS15R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS25/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Contouring	25 µm	3 pz	84,60
	LOS25L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Contouring	25µm	3 pz	84,60
	LOS25R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Contouring	25µm	3 pz	84,60
	LOS40/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS40L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS40R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS60/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOS60L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOS60R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOS80C/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
	LOS80C-L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
	LOS80C-R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
	L071	Refill per IPR Set, Double-Sided		6 pz	156,60
	L065DS	Kit completo Ortho-Strips, Double-Sided		6 pz	156,60
	L065L	Kit completo Ortho-Strips, One-Sided left		6 pz	156,60
	L065R	Kit completo Ortho-Strips, One-Sided right		6 pz	156,60
	LOST400	Tray Ortho-Strips con 6 inserti		1 pz	49,00
	L056ASS/6	Ricambi inserti in silicone		6 pz	8,80


REF.

DESCRIZIONE



GRANULOMETRIA
DEL DIAMANTEQ.TÀ x
CONF.PREZZO
IN EURO***new****ORTHO-STRIPS CENTRAL**

	LOS15POL-CEN-DS/3	Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS15POL-CEN-L/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS15POL-CEN-R/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS25F-CEN-DS/3	Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Contouring	25µm	3 pz	84,60
	LOS25F-CEN-L/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Contouring	25µm	3 pz	84,60
	LOS25F-CEN-R/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Contouring	25µm	3 pz	84,60
	LOS40M-CEN-DS/3	Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS40M-CEN-L/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS40M-CEN-R/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS60C-CEN-DS/3	Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOS60C-CEN-L/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOS60C-CEN-R/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOST400Set02/6	Tray Ortho-Strips, Central, Double-Sided		6 pz	167,40
	LOSSetCEN02L/6	Tray Ortho-Strips, Central, One-Sided left		6 pz	156,60
	LOSSetCEN02R/6	Tray Ortho-Strips, Central, One-Sided right		6 pz	156,60

SPESSIMETRI

	LIPRDC010/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,10 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC015/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,15 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC020/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,20 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC025/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,25 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC030/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,30 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC040/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,40 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC050/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,50 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC100/3	IPR-DistanceControl, spessore 1,0 mm		3 pz	27,50
	LIPR-DC SET	Set IPR-DistanceControl		8 pz	68,00

STRUMENTI MANUALI

	LAO2018DS/3	ApproxOpener, Double-Sided	8µm	3 pz	77,50
	LAO2018OS/3	ApproxOpener, One-Sided	8µm	3 pz	77,50
	LOSM1508/6	Ortho-Strips Manuali FE	8/15µm	6 pz	70,80
	LOSM8040/6	Ortho-Strips Manuali CM	40/80µm	6 pz	70,80

PRODOTTI PER
STRIPPING
IN ORTODONZIA

SI RINGRAZIANO
PER LE FOTOGRAFIE
CLINICHE CONCESSE:

- DOTT. M. CIRAVOLO, NAPOLI, ITALIA
- DOTT. F. GARINO, TORINO, ITALIA
- DOTT.SSA G. FORTINI, FIRENZE, ITALIA
- DOTT.SSA E. CARLI, MASSA CARRARA, ITALIA
- DOTT. A. CABURLOTTO, VENEZIA, ITALIA
- DOTT. F. GIUNTOLI, PISTOIA, ITALIA

FABBRICATO DA



INTENSIV SA

Via Molino 107
6926 Montagnola, Svizzera
Tel. +41 91 986 50 50
Fax +41 91 986 50 59
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

DISTRIBUITO IN ITALIA DA



LEONE S.p.A.

Via P. a Quaracchi 50
50019 Sesto Fiorentino, Firenze, Italia
Tel. +39 055 30 44 1
Fax +39 055 37 48 08
info@leone.it
www.leone.it

UFFICIO VENDITE ITALIA

Tel. +39 055 30 44 600
Fax +39 055 37 48 08
italia@leone.it